

DELUX SHAPE

Uredaj nove generacije za postizanje najboljeg učinka u oblikovanju tijela i zatezanju kože. Koristi 4 tehnologije: ultrazvuk, radiofrekvenciju, rolere i vakum.

KAKO RADI DELUX SHAPE

Delux Shape ima 4 aplikatora

- Aplikator za tijelo s dvije ultrazvučne glave i vakumom učinkovito smanjuje obujam uništavajući membrane masnih stanica
- Aplikator za tijelo koji objedinjuje 3 tehnologije: rolere + vakum + radiofrekvenciju i služi za uklanjanje celulita i zatezanje kože
- Aplikator za lice s kombinacijom RF-a i vakuma ima dvojako djelovanje:
 - pokretanje limfe prije tretmana ultrazvučnim aplikatorom
 - zatezanje kože lica, vrate i dekoltea
- Aplikator za područje oko očiju: RF + vakum

Delux Shape osnovni aplikator sastoji se od dvije ultrazvučne glave postavljene pod određenim kutem između koji se nalazi vakum. Vakum usisava masno tkivo i precizno ga postavlja između nasuprot postavljenih ultrazvučnih glava čime se učinkovito usmjerava energija na tretirano područje i time pojačava učinak.

ZAŠTO ODABRATI DELUX SHAPE

- Delux Shape uređaj predstavlja jedinstvenu ponudu na tržištu kojom se istovremeno može raditi na smanjenju obujma, oblikovanju tijela, te pomlađivanju lica koristeći četiri različite tehnologije međusobno kombinirane u tri različita aplikatora.
- Aplikator s vakumom vrši limfnu drenažu čiji se učinak dodatno pojačava istovremenim korištenjem radiofrekvencije kojom se zagrijava, time i prokrvljuje potkožno tkivo.
- Kao dodatak na Delux shape uređaju se nalazi i treći aplikator kojim se oblikuje tijelo sinergijskim djelovanjem triju tehnologija: rolera, vakuma i radiofrekvencije.
- Zahvaljujući izmjenjivim glavama aplikatora raznih veličina isti se koristi i za pomlađivanje lica.



TERMO DEKA

- Pruža detoksifikaciju i sprječava nakupljanje masnoća u tijelu
- Ubrzava lipolizu, znojenje te izlučivanje štetnih tvari
- Aktivira tijelo i njegove funkcije. Radi na principu pražnjenja odloženog otpada u tijelu, kao što su teški metali, otrovi te aktivira hormone i vrenje
- Ubrzava metabolizam te istovremeno eliminira umor i poboljšava apsorpciju hrane
- Balansira autonomni živčani sustav, poboljšava mišićnu masu, mliječnu kiselinu i rad jetre, te utječe na poboljšanje raspoloženja
- Poboljšava imunološki sustav
- Uklanja bol i upale
- Oporavlja organizacijske funkcije tijela

Unutar usluga anticelulitnog tretmana i tretmana za mršavljenje koristi i **termo deku** koja se zasniva na infracrvenim zrakama koje su dokazano učinkovite i sigurne znanstvene metode za gubljenje kilograma i oblikovanje tijela. Infracrveno zračenje prodire u kožu, mišiće, kosti te crijeva.

Takav način zagrijavanja pomaže u ubrzavanju cirkulacije, staničnoj aktivaciji te metabolizmu stanica. Termo deka ima dobre učinke na smanjenje upala, sterilizaciju, zacjeljivanje, smanjenje težine, itd. Koristi se za anticelulitni tretman i tretman za mršavljenje

Prije samog ulaska u termo deku, tijelo se tretira odgovarajućim preparatima (u pravilu anticelulitnim kremama) i umata u aluminijsku foliju. Zagrijanost termo deke je između 30 i 60°C , te se temperatura prilagođava ovisno o stanju i potrebama naših klijenata.

PREDNOSTI TERMO DEKE:

- Pruža detoksifikaciju i sprječava nakupljanje masnoća u tijelu
- Ubrzava lipolizu, znojenje te izlučivanje štetnih tvari
- Aktivira tijelo i njegove funkcije. Radi na principu pražnjenja odloženog otpada u tijelu, kao što su teški metali, otrovi te aktivira hormone i vrenje
- Ubrzava metabolizam te istovremeno eliminira umor i poboljšava apsorpciju hrane
- Balansira autonomni živčani sustav, poboljšava mišićnu masu, mliječnu kiselinu i rad jetre, te utječe na poboljšanje raspoloženja
- Poboljšava imunološki sustav
- Uklanja bol i upale
- Oporavlja organizacijske funkcije tijela

Primjena termo deke neizostavna je u brojnim tretmanima mršavljenja i uklanjanja celulita, posebno u body wrappingu.



LIFNA DRENAŽA – **PRESOTERAPIJA**

Sjedilački način života, stresni dani na poslu i brza putovanja ostavljaju tragove na vašem tijelu. Limfna drenaža je terapija kojom se metodom upuhivanja zraka stvara pritisak na točno određene dijelove tijela, čime se mehanički potiskuje nataložena međustanična tekućina. Terapijom se potiče funkcija limfnog sustava pa se tako brže izlučuju štetne tvari iz tijela kao i suvišne tekućine. Cjelokupni tretman dovodi do stanja opuštenosti, prestanka natečenosti i boli koja je eventualno bila prisutna ranije.

Saznanje da suvremeni način života pored dobrih donosi i cijeli niz neugodnih i nepoželjnih stvari, postaje sve jasnije i bolnije. Neprestani stres, predugo sjedenje uz premalo gibanja, prekomjerna tjelesna težina, nepravilna prehrana - sve to predstavlja opterećenje za naš organizam. Posljedice su loša prokrvljenost tkiva - posebno nogu, stražnjice i trbuha, nakupljanje otpadnih produkta metabolizma, punjenje i povećanje volumena masnih stanica, oticanje nogu, pojava celulita i proširenih vena.



Limfna drenaža je medicinsko-kozmetički tretman koji potiče razgradnju celulita, smanjenje obujma, prokrvljenost tkiva i otklanjanje edema. Limfnom drenažom, zvanom i presoterapija, postiže se ravnoteža tekućina u organizmu i bolje opće stanje organizma jer limfa - bezbojna tekućina koja se sastoji od plazme, bijelih krvnih stanica (limfociti) i nešto crvenih krvnih stanica, tj. njeni limfociti vežu na sebe strane ili kancerogene stanice, tvari, mikrobe te ih izbacuju iz tijela. Limfa prolazi kroz mnoge limfne žlijezde koje su veličine od 3 do 6 centimetara, a njihov je zadatak da kružeći cijelim tijelom, pročišćavaju limfu od bakterija.

Limfnu drenažu obavezno preporučamo našim klijenticama koje dolaze na tretmane oblikovanja tijela i žele još bolje rezultate. Limfna drenaža višestruko pozitivno djeluje na naš organizam jer prenosi hranjive tvari i kisik iz krvi do svake naše stanice, a na povratku sakuplja štetne tvari i vraća se u krvotok pa se stoga preporuča i nakon kirurških zahvata jer ublažava bol, dugotrajne ožiljke, zadebljanja kože te podiže imunitet u tretiranom dijelu tijela.

Limfna drenaža može biti uključena u sve naše pakete tretmana za oblikovanje tijela,

Kandidati za limfnu drenažu :

- imate lošu prokrvljenost tkiva - posebno nogu, stražnjice i trbuha;
- nakupljate otpadne produkte metabolizma;
- vaše noge otiču;
- vidite celulitne promjene kože i potkožja;
- vam se pojavljuju nove ili uočite pogoršanje postojećih proširenih vena.

Pripreme za limfnu drenažu nema. Sve što trebate napraviti jest opustiti se i uživati u tretmanu.

Mehanička limfna drenaža najčešće se koristi u procesu mršavljenja tj. uklanjanja celulita jer je najučinkovitija u izbacivanju viška tekućine iz tkiva te uklanjanja otpadnih tvari iz organizma koje se zamjenjuju zdravim i hranjivim tvarima koje dolaze s krvlju. Aparat za limfnu drenažu radi prema načelu isprekidane pneumatske kompresije tzv. presoterapije rukava i nogavica koje se pune zrakom u programiranim vremenskim intervalima. Masaža ekstremiteta događa se na osnovi kompresije rukava i nogavica napunjenih zrakom u koje se komprimirani zrak upuhuje iz baznog uređaja (kompresor) kroz sustav cjevčica. Svaki rukav i nogavica sastoji se od više međusobno neovisnih zračnih komora koje se napuhuju u prethodno definiranim ciklusima, ovisno o pacijentovoj dijagnozi. Stvaraju se polagani valovi tlaka, a zrak se ispuhuje nakon završetka ciklusa. Na tretiranom području dolazi do osjećaja ugone i olakšanja.



Naime, upuhivanjem zraka stvara se pritisak na određene dijelove tijela, čime se mehanički potiskuje nataloženu međustaničnu tekućinu natrag u krvotok. Tako se smanjuje opseg trbuha i bokova, stvara se ravnoteža protoka hranjivih tvari i kisika, poboljšava se cirkulacija i sprječava upala vena, posebno kod osoba koje uglavnom sjede na radnom mjestu.

Prednosti mehaničke limfne drenaže:

- smanjenje otekline nogu;
- razbijanje i razgradnja celulita (učinak se poboljšava u kombinaciji s Med Contour tretmanom);
- poboljšanje cirkulacije;
- pomaže učvršćivanju i zatezanju kože;
- pomaže izbacivanju toksičnih tvari iz organizma;
- primjena presoterapije pogoduje procesima ozdravljenja u ljudskom tijelu.

Oporavka nakon limfne drenaže nema. Tretman možete napraviti u vrijeme pauze - dnevnog odmora i odmah nakon obavljenog tretmana nastaviti sa svojim svakodnevnim aktivnostima.

VACUMSLIM 48

- 1) Klijenta prije početka tretmana izvagamo i izmjerimo i upišemo **vrijednosti** u Vacuslim 48 karton.
- 2) Klijenta u stajaćem položaju namažemo s THERMO SLIMMING SERUM 1 od struka pa do stopala.
- 3) Izabrane predjele tijela namažemo sa SLIMMING & FRIMING CREAM 2, koja sadrži aktivne sastojke. Ti aktivni sastojci se usredotoče posebno na **razgradnju masnoće i otklanjanje viška tekućine**. Krema ima termo-krio učinak i ostavlja ugodan osjećaj na koži vaše stranke.
- 4) klijenta oblačimo u WRAPP VREĆU i polegnemo ju na kozmetički stol. Važno je, da je stranka u ležećem položaju, jer se samo tako pravilno može izvesti tretman za oblikovanje tijela.
- 5) U donjem dijelu WRAPP VREĆE umetnemo cijev ručnog usisavača i izvucujemo sav zrak, da stvorimo vakuum. Klijenta pokrijemo i ostavimo 30 minuta, tako da svi aktivni sastojci iz VACUSLIM 48 dostignu svoj najbolji i najveći učinak.
- 6) Nakon 30 minuta odstranimo WRAPP vreću, s ručnikom obrišemo višak tekućine i zatim napravimo anti-celulitno masažu s masažnim uljem ANTI-CELLULITE & FIRMING MASSAGE OIL 3.

Ponovo izvagamo i izmjerite stranku te ju iznenadimo odličnim rezultatom!

Preporučamo: Da bi postigli najbolje i dugotrajne rezultate, upotrebljavajte Vacuslim 48 svaki drugi dan, 6-12 tretmana. Klijenta informiramo o važnosti redovnog održavanja Vacuslim 48 i načina prehrane



BODY WRAPPING –UKLANJANJA CELULITA

Body wrapping je anticelulitna metoda kojom istodobno oblikujemo tijelo te smanjujemo njegov obujam, a rezultate mjerimo u centimetrima. Već sam naziv „body wrapping“ govori nam da je riječ o postupku omatanja tijela u kombinaciji s posebnim kozmetičkim proizvodima osmišljenim za body wrapping. Omatanjem tijela posebnom folijom osigurava se bolje prodiranje fitoaromatskih sastojaka iz proizvoda za body wrapping u kožu i potkožno tkivo, gdje aktivni sastojci obavljaju željene učinke razgradnje i detoksikacije.

FOLIJA?

Kako je riječ o fitoaromaterapijskim preparatima koji su hlapljivi, posebnom folijom osmišljenom specijalno za ovu vrstu tretmana zaustavljamo hlapljenje proizvoda. Vrlo je važno pravilno omotati tijelo jer neodgovarajućim omatanjem prekidamo protok limfe te na taj način možemo prouzročiti više štete nego koristi – zato se ovaj tretman ne preporuča primjenjivati u kućnoj radinosti.

Kako je celulit masno tkivo koje se u usporedbi s običnom masnoćom teško uklanja, potrebno ga je sagledati iz šire perspektive i svaki od anticelulitnih programa njege maksimalno prilagoditi pojedincu. Stadija celulita koje različito treba tretirati: **meki celulit** koji još nema vidljivih promjena, ali već nastaju edemi zbog slabe cirkulacije. To je stupanj u kojem s lakoćom možemo ukloniti celulit. Drugi stadij koji karakterizira **tvrdi odnosno kompaktni celulit** je kompleksniji i potrebno mu je posvetiti veću njegu – ovdje su potkožno tkivo i dermis već dosta promijenjeni, izražajan je izgled narančine kore. Na dodir se osjećaju tvrde kvržice i masni čvorovi. U tom razvojnom stupnju može doći do upale vezivnog tkiva i dodir može biti bolan.

Razlikujemo topli i hladni body wrapping – njegov učinak odnosno osjećaj grijanja ovisi o aktivnim sastojcima odabranih preparata. Kako se pojedinačne razvojne faze celulita međusobno prilično razlikuju, zbog toga za uklanjanje zahtijevaju i poseban tretman. Često se susrećemo sa klijentima s izraženim proširenim venama, srčanim i drugim oboljenjima kojima se preporuča tretman s toplinskim učinkom i osim toga nekim strankama učinak grijanja ili hlađenja ne odgovara zbog subjektivnih osjećaja. Netko jednostavno bolje podnosi toplinu, a netko hladnoću.

Topli body wrapping s intenzivnim toplinskim učinkom preporuča se za uklanjanje mekog ili vodenog celulita, dok se na ovaj način nikako ne smiju tretirati stranke koje na tretiranim dijelovima tijela imaju izražene proširene vene i/ili kapilare. Također, kontraindikacije za izvođenje ovog tretmana su srčana oboljenja, šećerna bolest, problemi sa bubrežima, a u ovu skupinu spadaju i trudnice i dojilje.

Hladni body wrapping s intenzivnim učinkom hlađenja na koži preporuča se za uklanjanje tvrdog ili kompaktnog celulita, možemo ga preporučiti i strankama koje imaju problema sa venama i/ili kapilarama, te onima koji ne podnose dobro toplinu. Također ovaj tretman ne primjenjujemo za njegu trudnica i dojilja.

Kao nadopunu tretmanu body wrappinga preporučamo limfnu drenažu- presoterapiju . lifna drenaža pospješuje učinak body wrappinga. Već samom drenažom poboljšava se cirkulacija i ubrzava protok limfe, a uporabom posebnih preparata za masažu dodatno se pospješuje proces izlučivanja vode i drugih produkata metabolizma te se istodobno potiče proces razgradnje masti.



NARUDŽBE :

Naručite se na **besplatne konzultacije** za neinvazivno oblikovanje tijela na kojima će Vas naše specijalistice savjetovati o tretmanu oblikovanja tijela i uklanjanja celulita, stanju Vašeg tijela i broju tretmana koji su Vam potrebni.