

Čišćenje i održavanje :

1 . Ugasite masažer i ostavite ga da se ohladi prije čišćenja

Čistiti samo sa mekom , blago vlažnom spužvom.

Nikada nemojte dopustiti da masažer bude mokar prilikom čišćenja.

2 . Nemojte uranjati masažer u bilo kakove tekućine za čišćenje .

3 . Nikada ne koristite sredstva za čišćenje , četke, benzin, kerozin , staklo / namještaj, za nokte ili razrjeđivač za čišćenje na ovom proizvodu .

4 . Ne koristite kemikalije ili abrazivna sredstva za čišćenje, jer takovo čišćenje izvana sa kemikalijama mogu oštetiti materijal masažera

5 . Masažer je namijenjen isključivo uporabi u kućanstvu, salonima itd.

6 . Nemojte koristiti aparat za što drugo osim za namjeravanu uporabu .

7 . Nemojte koristiti ređaj s nekvalitetnim produžnim kabelom.

8 . Nemojte koristiti masažer ako je u kvaru, ili je oštećen na bilo koji način , moraju Aparat pregledati kvalificirane osobe .

9 . Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi svoga zdravlje , ili patite od bolesti koje mogu dati razlog za zabrinutost korištenja masažera , posavjetujte se s liječnikom prije korištenja proizvoda .

10 . Preporučuje se da osobe koje imaju ugrađen pacemaker se trebaju obratiti svom liječniku za dozvolu prije korištenja ovog proizvoda .

11 . Nikad ne prekrivati aparat kada je u radu.

12 . Nemojte koristiti proizvod više od 15 minuta.

13 . Nikada ne koristiti ovaj proizvod ukoliko imate natečena ili upaljena područja tijela ili kože .

14 . Ovaj proizvod je profesionalni aparata osmišljen kako bi pružio samo umirujuće masaže.

15 . Ne koristiti ovaj proizvod kao zamjena za liječničku pomoć .

16 . Nemojte koristiti ovaj proizvod prije nego što odete u krevet , jer masažer ima poticajno djelovanje i može odgoditi kod nekoga spavanje.

17 . Nemojte koristiti proizvod u krevetu kao podmetač za spavanje.

18 . Ne koristite ga kada je presavijen.