

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Stavite u usta otvor na aparatu i udahnite zrak preko inhalatora soli! Udahnite normalnim intenzitetom! Izdisaj treba činiti preko nosa, jer zrak kod izdisaja sadrži takav nivo vlažnosti koji može oštetiti djelujuće sredstvo inhalatora soli. Zato se inhalator soli preporučuje za djecu iznad 5 godina. Postupak čišćenja može ići sa jačim kašljanjem i curenjem nosa koji predstavljaju normalnu pojavu. Organizam se na ovaj način oslobađa nagomilanog zagađenja. Preporučujemo vrijeme korištenja: dnevno 15-25 minuta. U cilju boljeg efekta koristite inhalator soli svaki dan! Nakon odstranjivanja vrećice soli inhalator soli se može prati i dezinficirati. Nakon što se inhalator osušio, odstranjena vrećica soli može se vratiti na svoje mjesto, ili se stavi nova originalna vrećica soli.

Aparat držati na suhom mjestu!